

## 医療従事者に優しい設計

Incident Barrier MedicalShield

# I・B・M Shield

アイ・ビー・メディカルシールド

ゆがみのないクリアなシールドのため視界を妨げることがありません。  
フレームは後ろのバンドで簡単に調整できます。



フレーム色 黒



フレーム色 白

### 特徴

- ★ 横からの飛沫を防止するために耳付近まで覆ったシールド
- ★ ゆがみのないクリアな視界
- ★ 帯電防止剤入りのため、ゴミが付着しづらいシールド
- ★ マスク、眼鏡を付けた状態でも余裕の空間を確保
- ★ 一般的なサイズS～LLまでフレームとベルトによりサイズ調整可能
- ★ 総重量50gと軽量


# 取扱説明書

品番 IB20204-0005W/B


MADE IN JAPAN

## 各部の名称

### ● シールド

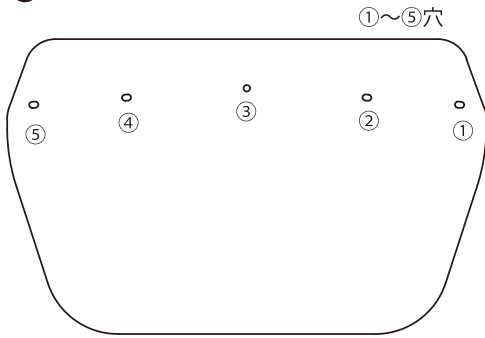


### ● フレーム

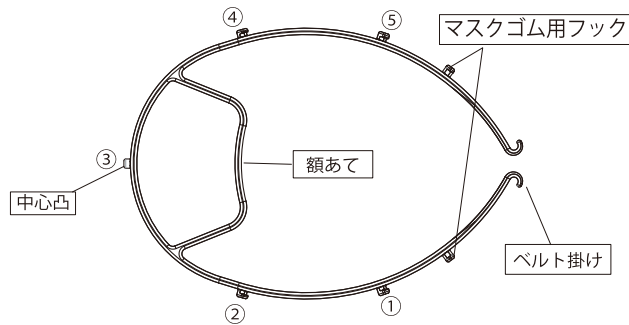

### ● ベルト



### ● パット (額あて用)

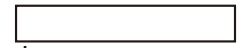

小



大

フレーム色は白と黒をご用意しております。



## セット内容 / 販売価格

名称	サイズ (mm)	材質・仕様	セット入数	ケース販売価格
シールド	300×240×0.2	塩化ビニール (PVC) 帯電防止剤入	5 枚入	1袋5セット入×10 ¥37,500 (税別)
フレーム	215×146×8	ポリアセタール (POM) 白・黒	5 枚入	
ベルト	220×20×3	ポリオレフィンエラストマー	5 枚入	
パット (大・小)	小 50×8×3 大 50×20×3	EPT スポンジ	各 5 枚	

※シールドのみの販売も行っております。


## シールドの取り付け方法

1. フレーム側面にあるフック①②をシールドの穴①②にはめ込みます。(中央方向にスライドさせると、中心部分③の穴がはめ込みやすくなります)
2. フレーム③の中心凸部を指でつまみながら、反対側も同じように④⑤をはめ込みます。(シールドの端を持ちながら引っ張るとはめ込みやすくなります) フレームとシールドの5箇所全てが固定された事を確認して下さい。
3. フレーム側面後部にマスクゴムを掛けるフックを設けています。必要に応じてご使用ください。

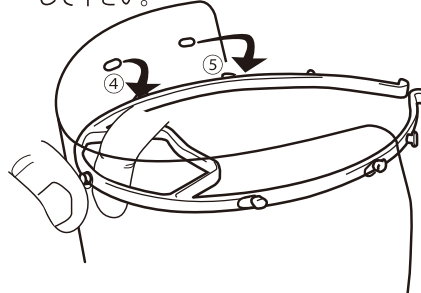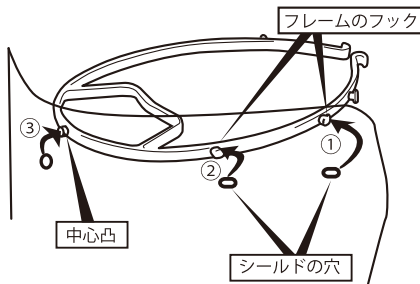


### ◆ 額あてにパット貼り付け方法

パットは大小2種類ある中でお好みのものをお選びください。

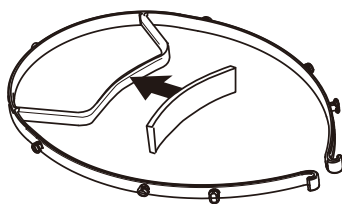


### ◆ ベルトの取り付け方法

ベルト掛けにベルトの穴を入れます。調整は片側5箇所穴で調整できます。

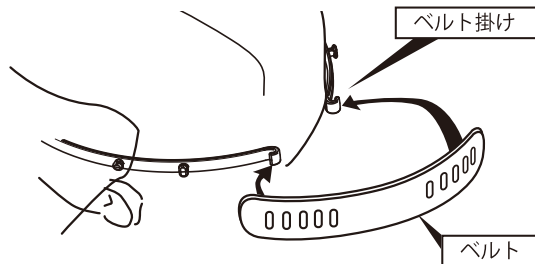

### ◆ 組み合わせでお使いいただけます。

眼鏡をかけた状態でもご使用いただけます。

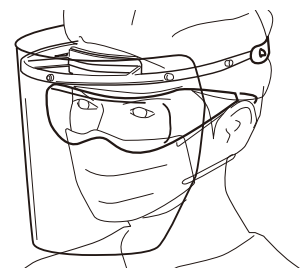

## 注意事項

- 1) フレーム及びシールドは使い捨て製品となります。
- 2) シールド面にキズ・汚れ等が附着すると視界がさえぎられ事故を引き起こす原因となりますので適宜新しい製品に交換してください。
- 3) 本品は、微少な粉塵や水滴等の飛沫が顔にかかることをできるだけ防ぐことを目的としています。使用者の眼や身体の損傷を防ぐものではありませんので注意してご使用ください。
- 4) 分解、改造等はいししないでください。
- 5) シールドの縁(シールドの外周の切断面)は厚さが薄いため、皮膚を傷つける等けがをすることがあります。注意してご使用ください。
- 6) 取外し方は、ベルトのどちらかの端を持ちながらフレームから取り外し反対側のベルト掛け部とベルトを持ちながら外します。
- 7) 交換する場合は純正品をご使用ください。

## お問い合わせ

販売元 サンキョウサポート株式会社

製造元 **IPJ** 有限会社 アイ・プロジェクト

〒662-0025 兵庫県西宮市北名次町8-15 TEL. 090-9163-5946 FAX. 0858-28-3838

〒578-0965 東大阪市本庄西1丁目5番27号

E-mail. sankyou-kagami@bcc.bai.ne.jp https://sankyou-sp.com/