

鳥取大学医学部附属病院の医師が考案した

使い捨て

簡単サイズ調節

アイデア設計



# 紙製フェイスシールド ORIGAMI

## 顔面への飛沫をガード！ 咳やくしゃみの飛散を防止！

### 商品特長

#### 誰でも簡単組立

折りスジに沿って折り曲げるだけ

#### 安心の防滴仕様

外側全面にフィルム貼り加工

#### 気軽な使い捨て

現場の負担や感染リスクを軽減

窓が曇りにくい  
内側に十分な隙間を確保  
N95マスクも干渉しにくい

見やすいフラット窓  
視野の反射や歪みを低減  
着用者の顔が見える安心感



長時間でも快適  
フィットするバンド形状  
軽量で締め付けない装着感

飛沫防護フラップ  
顔面の上下左右からの  
飛沫に対するガード


## 折り紙のように折りたたむと、フェイスシールドになります。

#### 【組立方法】

まずは折って  
みてください



一度折ればわかります  
折り紙より簡単です

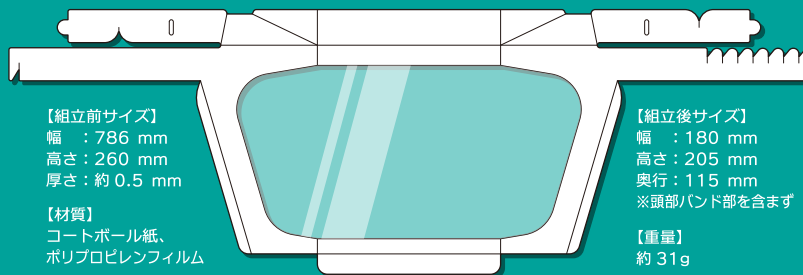

【組立前サイズ】  
幅 : 786 mm  
高さ : 260 mm  
厚さ : 約 0.5 mm

【材質】  
コートボール紙、  
ポリプロピレンフィルム

【組立後サイズ】  
幅 : 180 mm  
高さ : 205 mm  
奥行 : 115 mm  
※頭部バンド部を含まず

【重量】  
約 31g

※製品改良のため、仕様および外観は予告なく変更になる場合があります

#### 【開発協力】

健康の喜びの共有  
鳥取大学医学部附属病院  
TOTTORI UNIVERSITY HOSPITAL

トータルパッケージ  
株式会社 サフパック

ヤママデザイン  
デザインと商品企画

【お問合せ】

【販売元】

サンキョウサポート株式会社

〒662-0025 兵庫県西宮市北名次町8-15

TEL. 090-9163-5946 FAX. 0858-28-3838

E-mail. sankyou-kagami@bcc.bai.ne.jp <https://sankyou-sp.com/>

**重要**

本製品は微細な粉塵や水滴などから眼、顔をできるだけ保護することを目的としています。使用者の眼、身体の損傷を防ぐことを保証するものではありません。

**安全上の注意**

- 本製品は単回使用で、使い捨てです。窓面に汚れ等が付着すると視界をさえぎられ、安全の妨げになります。毎回新しいものをご使用ください。
- 本製品は素材の特性上、鋭利なものや無理な力によって破れが生じる場合があります。破れがある場合は、ご使用を中止し、新しいものをご使用ください。

- 本製品は滅菌されておりません。水や薬品、及び熱や圧力を使用した滅菌、清掃は製品の劣化、破損の原因となりますので行わないでください。
- ご使用者による改造、修理は事故の原因となり、危険ですので行わないでください。
- 製造上、本体表面に小さなキズや紙粉が付く場合がございます。ご使用には差し支えありません。
- 品質管理には万全を期しておりますが、万一、不都合がございましたら、お手数ですが、ご購入先または、販売元までご連絡をお願いいたします。

**取扱上の注意**

- ストーブなどの熱や火気のそばで、ご使用、保管しないでください。
- 水気を含んだもので拭いたり、水のそばで、ご使用、保管しないでください。
- 高温高湿及び直射日光を避けて、ご使用、保管してください。

組立方法 | 紙製フェイスシールド『ORIGAMI』

**1** グレー面を見えるように置き、側面を起こし、1 に折り目をつけて戻す

**2** 2 に沿って、帯の上半分を手前に折り重ね、しっかりと押さえる

**3** 次の①～④の手順で側面を起こす

① 手を離して帯が開いている状態

② 帯を折り重ねるようにこの辺りを押さえる

③ もう一方の手で帯の中央を引き起こす

④ 1 に沿って側面を起こす

反対側も同様に折る

**4** 内側の帯（額バンド）を組む

額バンドを前方に押し込む

**5** 左右フラップは外側、下フラップは内側に折る

**6** サイズ調節をしてから頭に装着する

組み立て動画をご覧ください。  
手順をわかりやすく解説しています。



窓面に触れず、ボール紙部を持って折り曲げてください。  
窓面が汚れると、視界をさえぎる原因となります。

【製造元】



有限会社サンパック

〒682-0835 鳥取県倉吉市長坂町 722-1  
TEL : 0858-28- 461  
FAX : 0858-28-5838

【販売元】

サンキョウサポート株式会社

〒662-0025 兵庫県西宮市北名次町8-15  
TEL.090-9163-5946 FAX.0858-28-3838

E-mail. sankyou-kagami@bcc.bai.ne.jp <https://sankyou-sp.com/>