

看護戦隊

新生児・小児両手可動制限サポーター

現場の声から
生まれた製品

スーパー まもるんジャー!!

小さなお子さんの手術後（例えば口唇裂、口蓋裂の術後など）の両手の可動を一時的に制限するためのサポーターです

特許
出願中



優しいお母さんの手と
同じようにサポートします。



補強材の
強度アップ

特徴

- ★ 肘が曲がりません
（指は自由に動かすことができ、物は自由につかめます）
- ★ サイズが自由に調整できます
- ★ 紙製ですので、燃えるゴミで廃棄して頂けます

※製品改良のため、仕様および外観は予告なく変更になる場合があります。

【販売元】

サンキョウサポート株式会社

〒662-0025 兵庫県西宮市北名次町8-15

TEL. 090-9163-5946 FAX. 0858-28-3838




E-mail. sankyou-kagami@bcc.bai.ne.jp <https://sankyou-sp.com/>

【お問合せ】

◆構成内容

スーパーまもるんジャーシート 2個

補強材(長・短)各2本

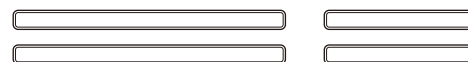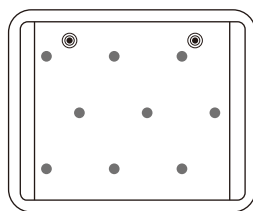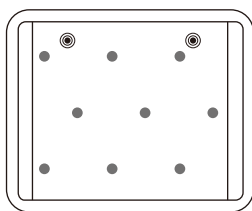

固定用テープ(白) 2本




固定用受マジックテープ(黄) 4個




紐 4本




- 1** スーパーまもるんジャーシートを、腕の前腕部分に合わせて長さをカットします。
*カットする方向を間違えないようにご注意ください。

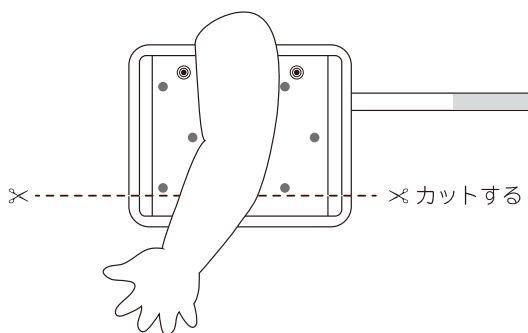


- 4** スーパーまもるんジャーシートに、付属の紐を取り付けます。シートに紐固定用穴が2か所ありますのでしっかりと固定します。

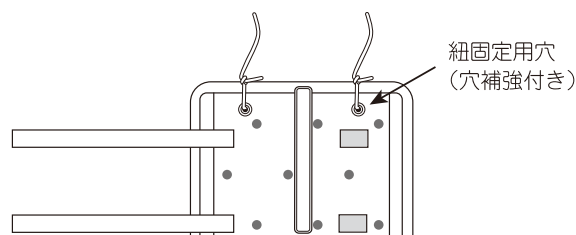


- 2** スーパーまもるんジャーシートを裏返し、カットした側の段ボール部分に、付属の固定用テープ(白)と補強材を貼り付けてください。

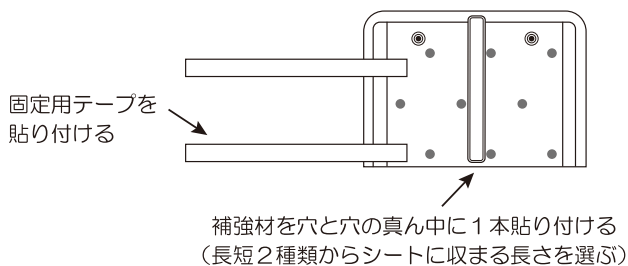


- 5** 前腕にスーパーまもるんジャーシートを巻き付けマジックテープで固定してください。
*取り付ける向きにご確認ください。

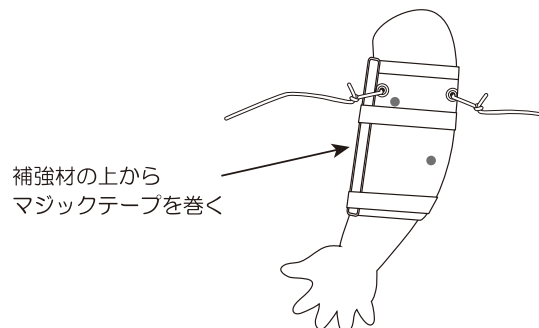

- 3** 固定用テープの取り付け位置の反対側に、付属の固定用受マジックテープ(黄)を貼り付けてください。
*受マジックテープは片側2個付属されています。適宜固定してください。

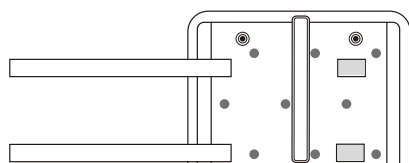

- 6** 首の後、胸の前で紐を結んで、適度な長さで固定してください。

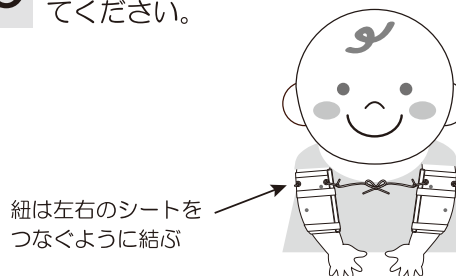

【使用上の注意】

- 本製品は使い捨てです。繰り返しのご使用はお控えください。
- 万が一、お子様が違和感を感じた場合、直ちに使用を中止してください。
- お子様が本製品をかみちぎって飲み込まないようにご注意ください。
- 本来の用途以外に使用しないでください。
- 本製品は滅菌されておりません。水や薬品、

及び熱や圧力を使用した滅菌、清掃は製品の劣化、破損の原因となりますので行わないでください。

- 熱源や火気のそば、及び水のそばに置かないでください。また、高温多湿、及び直射日光を避けて保管してください。火災の原因となったり、製品の著しい強度低下や変形が生じる恐れがあります。
- 製造上、段ボールの断面から紙粉や切りカスが

発生する場合がございます。気になる場合は、乾いたやわらかい布で表面を拭きとってください。

- 本製品は段ボール製です。段ボール原料はリサイクルされた原紙を主原料としており、原料由来の微細な色を帯びた粒等が現れることがありますが、ご使用に影響はございません。
- 品質管理には万全を期しておりますが、万一、不都合がございましたら、お手数ですが、ご購入先または、販売元までご連絡をお願いいたします。