

取扱説明書 | 飛沫防止ボックス『TM BOX LITE』

⚠ 重要

本製品は微細な粉塵や水滴などから、眼、身体をできるだけ保護することを目的としています。使用者の眼、身体の損傷を防ぐことを保証するものではありません。

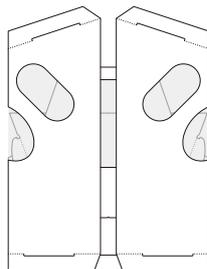
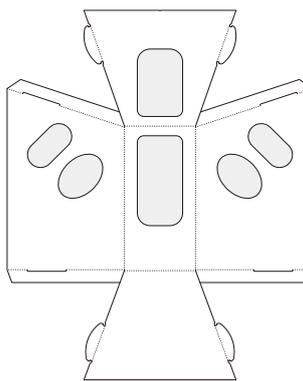
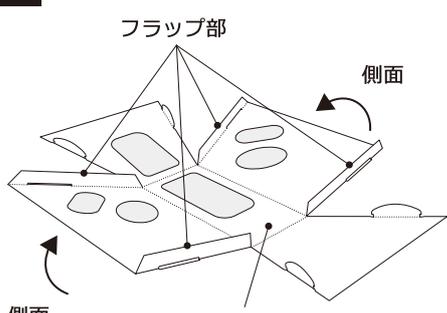
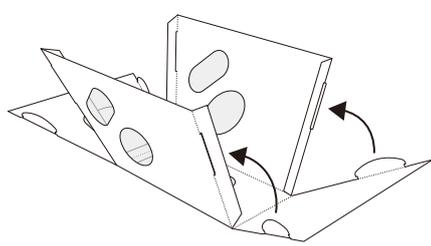
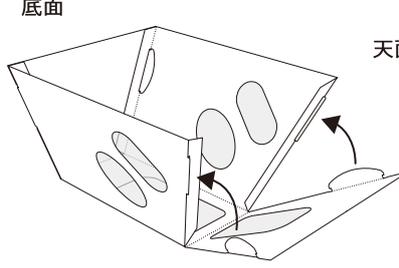
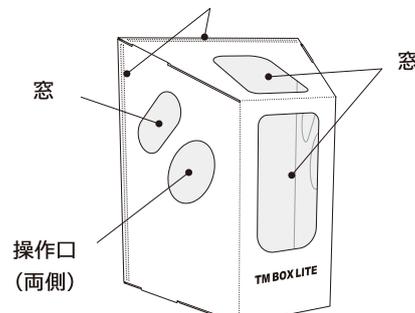
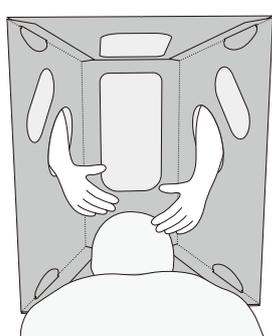
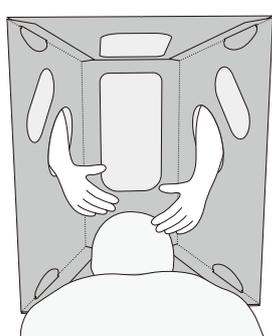
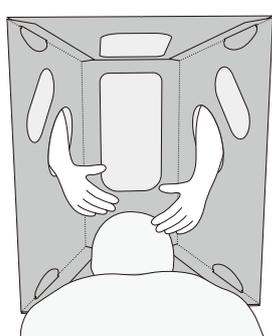
⚠ 安全上の注意

- 本製品は単回使用で、使い捨てです。窓に汚れ等が付着すると視界をさえぎられ、安全の妨げになります。毎回新しいものをご使用ください。
- 本製品は素材の特性上、鋭利なものや無理な力によって破れが生じる場合があります。破れがある場合は、ご使用を中止し、新しいものをご使用ください。
- 本製品は滅菌されておりません。水や薬品、及び熱や圧力を使用した滅菌、清掃は製品の劣化、破損の原因となりますので行わないでください。

- ご使用者による改造、修理は事故の原因となり、危険ですで行わないでください。
- ご使用の際には段ボールの断面で手を切らないようご注意ください。
- 本来の用途以外に使用しないでください。

⚠ 取扱上の注意

- ストーブなどの熱や火気のそばで、ご使用、保管しないでください。
- 水気を含んだもので拭いたり、水のそばで、ご使用、保管しないでください。
- 高温多湿及び直射日光を避けて、ご使用、保管してください。
- 製造上、段ボールの断面から紙粉や切りカスが発生する場合がございます。気になる場合は、乾いたやわらかい布で表面を拭きとってください。
- 品質管理には万全を期しておりますが、万一、不都合がございましたら、お手数ですが、ご購入先または、販売元までご連絡をお願いいたします。

<h3>1 開封状態</h3>  <p>【材 質】 段ボール、ポリプロピレンフィルム 【組立後サイズ】 W470×D340×H570mm 【重 量】 約 412g / 枚</p>	<h3>2 折りたたんである部分をすべて広げる</h3> 	<h3>3 フラップ部を内側に折り、側面を起こす</h3>  <p>フラップ部 側面 側面 中央にロゴ印刷の無い方が ボックスの内側となる</p>		
<h3>4 底面を組み立てる</h3>  <p>両サイドを差し込む</p>	<h3>5 反対側の天面を組み立てる</h3>  <p>底面 天面 両サイドを差し込む</p>	<h3>6 完成図</h3>  <p>両面テープ (必要に応じてシートを固定) 窓 窓 操作口 (両側) TM BOX LITE</p>		
<h3>7 使用方法</h3> <table border="0"><tr><td data-bbox="70 1500 766 1910"><p>使用時の内部イメージ</p><p>組み立てたボックスの内側底面に患者の頭部をのせ、ボックスを固定します。</p><p>術者は側面の操作口から手を入れ、施術します。</p></td><td data-bbox="766 1500 1516 1910"><p>シートの使用例</p><p>図のように、お手持ちのシートを両面テープで固定して使用することも可能です。</p><p>※シートは付属していません。</p><p>お手持ちのシート</p></td></tr></table>			<p>使用時の内部イメージ</p>  <p>組み立てたボックスの内側底面に患者の頭部をのせ、ボックスを固定します。</p> <p>術者は側面の操作口から手を入れ、施術します。</p>	<p>シートの使用例</p>  <p>図のように、お手持ちのシートを両面テープで固定して使用することも可能です。</p> <p>※シートは付属していません。</p> <p>お手持ちのシート</p>
<p>使用時の内部イメージ</p>  <p>組み立てたボックスの内側底面に患者の頭部をのせ、ボックスを固定します。</p> <p>術者は側面の操作口から手を入れ、施術します。</p>	<p>シートの使用例</p>  <p>図のように、お手持ちのシートを両面テープで固定して使用することも可能です。</p> <p>※シートは付属していません。</p> <p>お手持ちのシート</p>			

※製品改良のため、仕様および外観は予告なく変更になる場合があります。

【販売元】

サンキョウサポート株式会社

〒662-0025 兵庫県西宮市北名次町 8 番 15 号
TEL : 090-9163-5946(携帯) FAX : 0858-28-3838(物流センター)
E-mail : sankyou-kagami@bcc.bai.ne.jp
URL : <http://www.sankyou-sp.co.jp/>

【製造元】

シートタルパッケージ
有限会社 **サンパック**

有限会社サンパック

〒682-0835
鳥取県倉吉市長坂町 722-1