

サンキョウ
サポート
株式会社

医療の現場に 安心を届けたい


段ボール製で
捨てるのが
容易です

- ✓ 簡易な使い捨て飛沫防止ボックス
- ✓ 一般病棟・外来検査・救急外来に

TM BOX LITE

ティーエム ボックス ライト

現場の医師が試行錯誤の上、様々なシチュエーションに対応

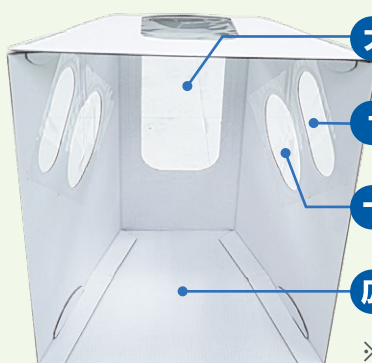

大きな窓 上からも前から患者さんの確認が容易

サイド窓 患者さんに圧迫感を与えない

十字カットフィルム エアロゾルの漏れを防止


広々フロント 介助者も処理がしやすい

※ 患者側にビニールシートの取付も可能(取扱説明書をご覧ください)

処置がしやすい
頭部
サイズ



使用方法

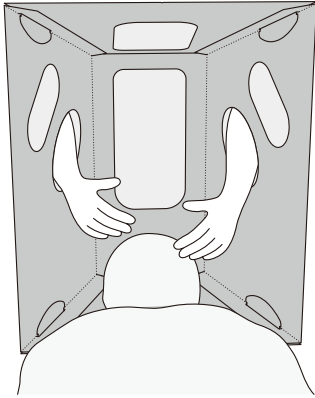

使用時の 内部イメージ

組み立てたボックスの内側底面に患者の頭部をのせ、ボックスを固定します。
術者は側面の操作口から手を入れ、施術します。



シートの使用例

お手持ちのシート

図のように、お手持ちのシートを両面テープで固定して使用することも可能です。

※シートは付属していません。

※製品改良のため、仕様および外観は予告なく変更になる場合があります。



重要

本製品は微細な粉塵や水滴などから、眼、身体をできるだけ保護することを目的としています。使用者の眼、身体の損傷を防ぐことを保証するものではありません。

安全上の注意

- 本製品は単回使用で、使い捨てです。窓に汚れ等が付着すると視界をさえぎられ、安全の妨げになります。毎回新しいものをご使用ください。
- 本製品は素材の特性上、鋭利なものや無理な力によって破れが生じる場合があります。破れがある場合は、ご使用を中止し、新しいものをご使用ください。
- 本製品は滅菌されていません。水や薬品、及び熱や圧力を使用した滅菌、清掃は製品の劣化、破損の原因となりますので、行わないでください。
- ご使用者による改造・修理は事故の原因となり、危険ですで行わないでください。
- ご使用の際は段ボールの断面で手を切らないようにご注意ください。
- 本来の用途以外に使用しないでください。

取扱上の注意

- ストーブなどの熱や火気のそばで、ご使用、保管しないでください。
- 水気を含んだもので拭いたり、水のそばで、ご使用、保管しないでください。
- 高温多湿及び直接日光を避けて、ご使用、保管してください。
- 製造上、段ボールの断面から紙粉や切りカスが発生する場合がございます。気になる場合は、乾いたやわらかい布で表面を拭き取ってください。
- 品質管理には万全を期しておりますが、万一、不具合がございましたら、お手数ですが、ご購入先または、販売元までご連絡をお願いいたします。

販売価格 **1ケース 37,400円**(税込)(20枚入)
JANコード 4580107634897 (20枚入)

材質 本体:段ボール 窓:ポリプロピレン
本体サイズ W:470mm D:570mm H:340mm
重量 412g/枚

1ケースサイズ W:665mm D:425mm H:510mm
1ケース重量 12kg

販売元

サンキョウサポート株式会社

〒662-0025 兵庫県西宮市北名次町8-15
TEL.090-9163-5946 FAX.0858-28-3838
E-mail.sankyou-kagami@bcc.bai.ne.jp
<https://sankyou-sp.com/>

製造元



一トータルパッケージ
有限会社 **サンパック**

〒682-0835
鳥取県倉吉市長坂町722-1

お問い合わせ